



### Slip Totaal

Geschikt voor het aan- en uittrekken van kousen met open of gesloten teen



### Slip Rond

Geschikt voor het aan- en uittrekken van kousen met open of gesloten teen




### Slip Open Teen

Geschikt voor het aan- en uittrekken van kousen met open teen



### Smooth Slip

Geschikt voor het moeiteloos aan- en uittrekken van kousen met open of gesloten teen

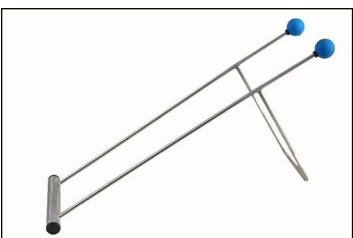

### DressBuddy® stand voor been en arm

Ook met weinig kracht in de handen kunt u voor been- en/of armkous zelfstandig aan en uit doen



Lukt het met ander hulpmiddelen niet om uw TEK uit te trekken, dan is het voor de **Ort.O.Mate** geen probleem

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

*Logo Organisatie  
Adresgegevens  
Plak hier uw eigen sticker*

Productnummer	Bestelcode
900	P-A-C-S
901	P-A-C-S+
902	P-A-C-S++
1000	P-A-C
1001	P-A-C+
1002	P-A-C++
1003	P-A-C-19
1004	P-A-C+-19
1005	P-A-C++-19



U kunt ook terecht op [www.eritekbv.nl](http://www.eritekbv.nl) of bij uw kousenleverancier

Alle producten kunnen op maat gemaakt worden


Bij gebruik, anders dan in de handleiding vermeld, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen




## Dressbuddy On/Off met Slip Voet en antislip matje

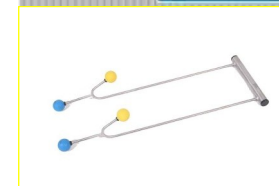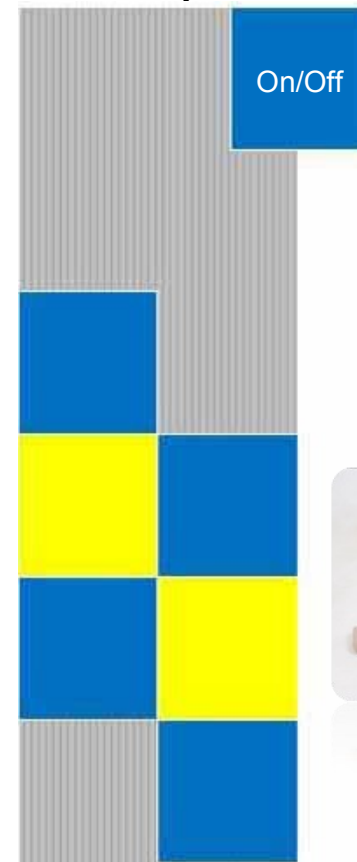


## Aantrekken

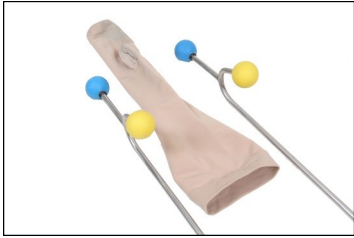

Leg de kous in het verlengde van de Dressbuddy® op tafel en met de hiel naar boven

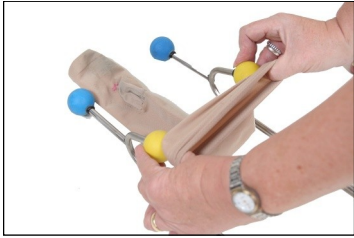

Sla de kous om de gele balletjes van de Dressbuddy®

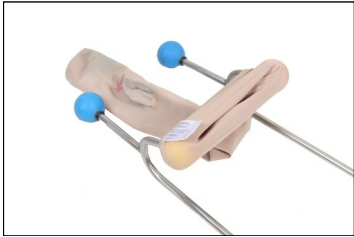

De bovenrand van de kous zit om de gele balletjes. Stop de driehoek van de sliep met de grijze kant boven, in de kous




Zet de DressBuddy® op het matje, stap in de kous en duw de voet verder in de kous voorbij de hiel. Lukt dit niet, probeer dan de TIP



TIP  
Til de voet op, draai de Dressbuddy® een kwartslag, duw een geel balletje over de hiel en draai weer terug



Trek de kous omhoog en stop met trekken zodra de bovenkant van de kous ter hoogte van de kuit is

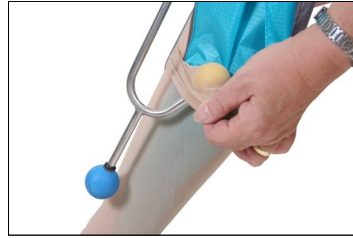


Nu kunt u met de hand de gele balletjes van de Dressbuddy® uit de kous halen



Duw de hiel van de kous eventueel op zijn plaats door met de onderkant van de voet over het matje te wrijven



Trek aan de binnenkant van uw been de sliep uit de kous, waarbij u de hak op het matje houdt, zodat de kous niet mee schuift

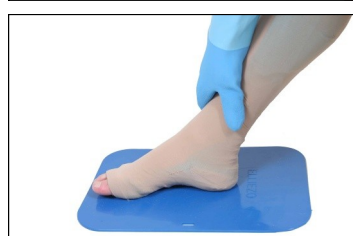

Rond uw been kunt u de kous eventueel met handschoenen nog secuurder rond uw been krijgen

## Uittrekken



Sla de sliep om het onderbeen



Haal de sliep door de lus, trek hem aan en zorg ervoor dat de sliep onder de hiel door gaat



Plaats de blauwe balletjes van de Dressbuddy® zo dicht mogelijk bij de kuit in de omslag van uw kous



Duw de kous over de sliep naar beneden tot de Dressbuddy® schuin op het matje staat



Trek de voet uit de kous

**Het uittrekken kan ook zonder gebruik van de sliep**